

Hygeia Enjoye Bomba De Lactancia



www.hygeiababy.com
888-PUMP-4-MOM (888-786-7466)



¿Quién Necesita Una Bomba De Lactancia?

• Una madre cuyo bebé no está siendo bien amamantado (o no amamantado del todo). En estos casos una bomba de lactancia de calidad es la mejor manera de mantener la producción de leche materna.

Investigadores de la Universidad de California Davis encontraron que, el 92% de las mamás primerizas manifestaron tres días después de dar a luz al menos una preocupación acerca del proceso de amamantar, incluyendo el bebé que no está sujetándose al pezón de manera adecuada (52%); dolor al momento de amamantar (44%); y producción de leche (40%).

• Una madre que planea regresar a un trabajo de jornada completa o parcial y que desea alimentar su bebé con leche materna.

• Una madre que necesita separarse ocasionalmente de su bebé por más de un par de horas.

• Una madre que necesita incrementar la producción de leche.



Accesorios Incluidos



Accesorios Opcionales




Estos artículos están también disponibles para la compra en nuestra tienda de Amazon.
www.amazon.com (búsqueda Hygeia)

Limpieza

Mantener su suministro de leche en forma segura es importante para nosotros. Favor limpie las partes antes de usar su bomba de lactancia por primera vez y después de cada uso.



1. Remueva las mangueras y el filtro de doble entrada y colóquelos aparte en una área limpia y seca.
2. Separe las copas de succión de los contenedores de depósito y remueva las válvulas de las copas de succión.
3. Lave completamente a mano las copas de succión, válvulas, contenedores de depósito, anillos y cobertores con un paño suave en agua tibia y jabón. Enjuague completamente. No se recomienda el uso de lavadora automática. NO LAVE O HUMEDEZCA LAS MANGUERAS O LOS FILTROS DE DOBLE ENTRADA A MENOS QUE HAYAN TENIDO CONTACTO CON LA LECHE.
4. Deje que todas las partes se sequen al aire libre sobre una toalla limpia o en una rejilla de secado.

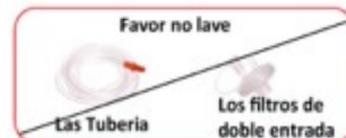

Para Iniciar

1. Conecte el cable de poder a un toma corriente eléctrico estándar.
2. Conecte el extremo final del cable de poder a la bomba de lactancia.
3. Tome el filtro de doble entrada y enrósquelo en la parte frontal de la bomba de lactancia, girándolo con un movimiento según las manecillas del reloj hasta que esté seguro. Es normal que quede una pequeña separación entre la bomba de lactancia y el filtro.
4. Coloque el extremo final de la manguera en cada una de las bases del filtro de doble entrada.
5. Si desea extraer leche solo de un seno, asegure la tapadera del filtro bacteriostático en una de sus bases.
6. Instale de forma segura la válvula en la superficie inferior de la copa de succión.
7. Inserte la parte final de color naranja de la manguera en el orificio de la parte posterior de cada copa de succión.
8. Asegure cada contenedor de almacenaje de leche girándolo en cada copa de succión.

Extracción

Lave siempre sus manos completamente antes de utilizar su bomba de lactancia y accesorios

1. Colóquese cómodamente en una posición relajada. El uso de paños tibios y/o masajear suavemente sus senos antes de comenzar el proceso de lactancia, puede ayudar a la producción de leche materna. Programe la extracción de leche con un seno a la vez mientras usted está aprendiendo, para lo cual se debe tapar una de las bases del filtro (ver instrucciones Para Iniciar figura #5). Centre la(s) copa (s) de succión sobre su(s) pezón(es).
2. Para comenzar la extracción, mueva la perilla superior de encendido/apagado y control de velocidad hacia la posición vertical según las manecillas del reloj. Coloque la perilla del control de fuerza de succión en la posición mínima hasta que la leche comience a fluir, luego reduzca la velocidad de extracción e incremente la fuerza de succión gradualmente hasta el nivel más alto que sea cómodo para usted.
3. Cuando finalice su sesión de extracción, apague la bomba de lactancia y desconecte la manguera de la parte posterior de la copa de succión. Desenrosque el contenedor de leche materna y almacénela apropiadamente.

Después de cada uso, favor siga las instrucciones de la sección de limpieza para asegurar que las partes necesarias estén limpias antes del siguiente uso.