



Hygeia™ Express Guía de Encendido Rápido



1. Inspeccione todas las partes. Informe a Hygeia sobre cualquier daño al: 714-515-7571 (Opción #2) ó visite: www.hygeiahealth.com

2. Cargue la batería.


La carga está completa cuando el ícono de la batería deja de parpadear.



3. Lave y desinfecte


todas las partes que están en contacto con el seno y la leche materna. (10 minutos en agua hirviendo ó en el ciclo de desinfección en lavadora de platos). Seque al aire libre sobre un paño limpio.

NO LAVE LA MANGUERA

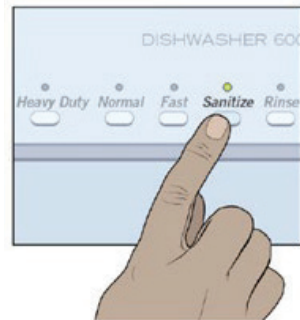


4. Lave sus manos y arme el kit de accesorios.

Kit De Accesorios Portatiles

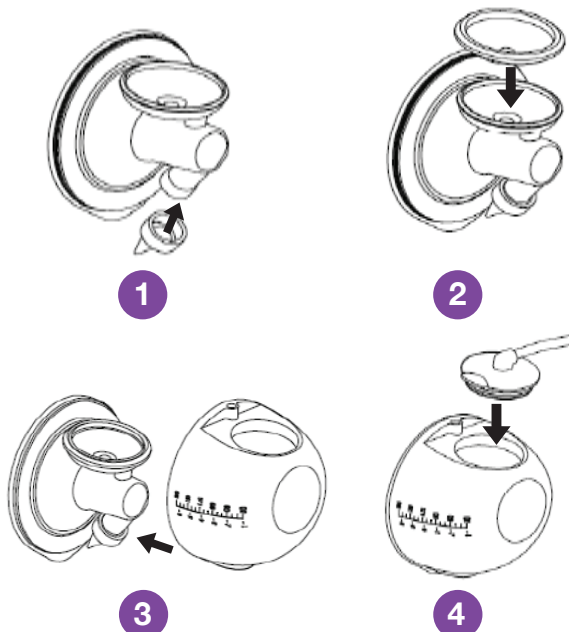

Juego De Accesorios Personales

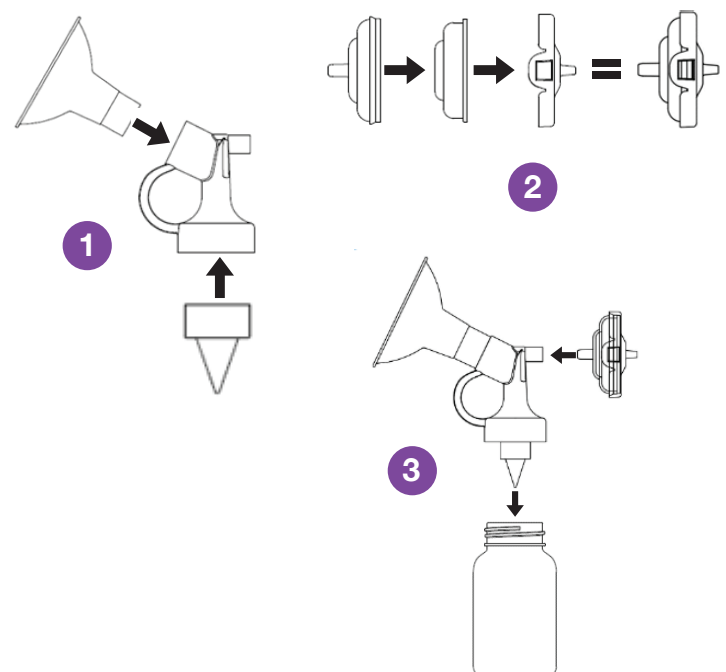

5. Inserte el adaptador de manguera en su extractor de leche.



6. Conecte el otro extremo de la manguera a la tapa naranja (kit portátil) o al protector contra reflujo (kit estándar)





Portátil



Estándar

7. Coloque la copa portátil firmemente sobre el seno, con la tapa naranja hacia arriba.

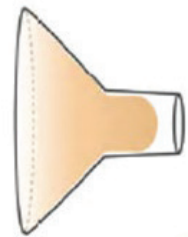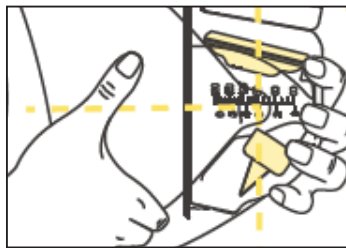

Ajuste correcto

8. Para comenzar su extracción de leche:

Presione  por 3 segundos = encender.

Presione “M” para cambiar entre “Masaje” y “Extracción”.

Presione “M” por 2 segundos para cambiar a “Estimulación”.

Presione  por 2 segundos = apagar.

Presione “+” para aumentar la succión.

Presione “-” para disminuir la succión.

NUNCA HAGA EXTRACCION DE LECHE CON DOLOR.

Presione “-” para reducir la succión.



9. Al terminar, APAGUE EL EXTRACTOR,

RETIRE las copas portátiles o copas de succión del seno, luego RETIRE las tapas naranjas. Vierta la leche de las copas portátiles a las botellas como se muestra o desenrosque las botellas del kit de accesorios personales y ciérrelas.



✓ Dirección de vertido correcta



✗ Dirección de vertido incorrecta

10. LAVE TODAS LAS PARTES QUE ESTAN EN CONTACTO CON LA LECHE MATERNA DESPUES DE CADA USO.